



SIMULATORE PER LA CURA INTESTINALE E LA PRATICA DEL CLISTERE P16

ISTRUZIONI PER L'UTENTE

1022519

> SOMMARIO

Introduzione al prodotto	3
Contenuto della fornitura	3
Funzioni	4
Pulizia e manutenzione	4
Impostazione	
Impostazione per la DRF.....	5
Impostazione per la DRE/DRS.....	6
Impostazione per il clistere.....	7
Dati tecnici	8
Elenco degli ordini	8
Informazioni di contatto	8

SIMULATORE PER LA CURA INTESTINALE E LA PRATICA DEL CLISTERE P16

➤ INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Il Simulatore per la cura intestinale e la pratica del clistere P16 può essere utilizzato per dimostrare come effettuare procedure per la cura delle disfunzioni del tratto intestinale inferiore, quali l'esplorazione rettale digitale (DRE), la stimolazione rettale digitale (DRS), la rimozione digitale delle feci (DRF) e la somministrazione del clistere. Questo simulatore di attività, dal costo decisamente vantaggioso, aiuterà il tuo team a migliorare le proprie competenze e acquisire maggiore sicurezza nelle proprie capacità e nella conoscenza delle linee guida e delle procedure cliniche. Il Simulatore per la cura intestinale e la pratica del clistere P16 di 3B Scientific® consente di presentare i principali scenari in modo realistico ed economicamente vantaggioso.



Nota:

L'enfasi didattica del simulatore si pone sul conseguimento di un'esperienza formativa realistica. Le strutture sono state progettate in modo da essere il più possibile realistiche. Alcune delle strutture potrebbero essere mostrate in maniera schematica.

➤ CONTENUTO DELLA FORNITURA



1. Simulatore per la cura intestinale e la pratica del clistere P16 con l'inserto glutei installato
2. Serbatoio interno per clistere con coperchio interno (2bis)
3. Scatola di fissaggio interna dell'inserto DRF/DRS
4. 1 inserto clistere
5. 1 inserto DRS
6. 1 inserto DRF
7. 2 modelli anatomici magnetici 3D di emorroidi
8. 4 feci solide artificiali (di tipo I scala Bristol)
9. Polvere per feci solide artificiali (150 g)

10. Polvere solubile per feci artificiali per CLISTERE (60 g)
11. Spatola per il dosaggio e contenitore per la preparazione delle feci
12. Flacone di sangue artificiale concentrato (250 ml)
13. Iniettore per il sangue completo di pipetta
14. Polvere di talco (100 g)
15. Vaselina
16. Scatola in plastica per la conservazione dei materiali di consumo
17. Borsa per il trasporto morbida (non mostrata nell'immagine)

SIMULATORE PER LA CURA INTESTINALE E LA PRATICA DEL CLISTERE P16

> FUNZIONI

Il Simulatore per la cura intestinale e la pratica del clistere P16 costituisce una rappresentazione generalizzata dei glutei di un paziente in una posizione semisdraiata sul fianco sinistro prestabilita e delle rispettive strutture di tessuto molle per rappresentare l'ano. La parte superiore dei glutei è realizzata in materiale morbido e flessibile altamente realistico; sollevandola, lo studente può localizzare e avere accesso all'ano.

I diversi inserti rettali digitali sono realizzati in robusto silicone 3B SKINlike™ per simulare la pelle umana e la percezione aptica del tessuto durante le procedure DRE e DRS. L'elevata qualità del materiale dell'inserto per clistere permette di preservare la chiusura e l'impenetrabilità dell'ano dopo la rimozione del catetere. Il design modulare consente un cambio semplice e rapido dell'impostazione (in meno di 1 minuto) per l'addestramento alle diverse tecniche sotto la supervisione dell'istruttore e durante la formazione pratica degli studenti.

Il Simulatore per la cura intestinale e la pratica del clistere P16 consente l'addestramento nelle seguenti procedure per la cura intestinale:

- Esplorazione rettale digitale (DRE) e Stimolazione rettale digitale (DRS)
- Rimozione digitale delle feci (DRF)
- Somministrazione del clistere
- Somministrazione di supposte
- Somministrazione di farmaci

L'uso di materiali siliconici flessibili di alta qualità offre un'esperienza di apprendimento tattile altamente realistica. Il sistema serbatoio sicuro di ricezione dei liquidi permette di utilizzare il simulatore portatile per la cura intestinale e la pratica del clistere P16 senza nessun rischio di fuoriuscite di liquido ed è facile da pulire. È inoltre possibile la somministrazione delle soluzioni per clistere normalmente utilizzate nella pratica clinica sino a un volume di 2 litri.



Nota:

Il simulatore offre la possibilità di utilizzare cateteri **CH16-CH40** e tubi rettali con palloncino. Assicurarsi di utilizzare sempre un catetere lubrificato prima di ogni inserimento nel modello per evitare danni.

> PULIZIA E MANUTENZIONE

Vuotare e pulire il simulatore dopo l'uso. Il sistema di serbatoio sicuro di ricezione dei liquidi permette di utilizzare il simulatore senza nessun rischio di fuoriuscite di liquido ed è estremamente facile da pulire, potendo essere smontato e lavato con acqua corrente.

Suggerimento:

Come assemblare il sistema serbatoio sicuro di ricezione dei liquidi:



Come disassemblare il sistema serbatoio sicuro di ricezione dei liquidi:



Dopo l'uso di vaselina e della preparazione di feci, lavare accuratamente con acqua pulita sino alla completa eliminazione di tutti i residui visibili. Assicurarsi che tutti i componenti siano completamente asciutti prima di riporli e, se necessario, utilizzare la polvere di talco per asciugare gli inserti di silicone.



Nota:

Non utilizzare detergenti contenenti solventi poiché potrebbero danneggiare la superficie. Evitare di applicare etichette e di marcare la superficie per non determinarne uno scolorimento permanente.

SIMULATORE PER LA CURA INTESTINALE E LA PRATICA DEL CLISTERE P16

> IMPOSTAZIONE



Suggerimento:

Seguire questo link per vedere sul nostro sito Web il „Video di installazione del simulatore P16“ che dimostra come configurare in modo semplice il simulatore. https://www.3bscientific.com/p_153_31843.html

IMPOSTAZIONE PER LA DRF

Parti necessarie:



Installazione:



1. Assicurarsi di installare correttamente l'inserto DRF nell'inserto glutei



2. Riempire l'inserto DRF con la preparazione di feci solide sino a un massimo di **2/3** della sua capacità



3. Mettere le feci solide nella preparazione di feci solide



4. Chiudere l'inserto DRF con il coperchio di silicone



5. Applicare il coperchio rosso sopra il coperchio di silicone



6. Assicurarsi infine di installare correttamente l'inserto DRF fissandolo con la scatola di fissaggio alla parte glutei

SIMULATORE PER LA CURA INTESTINALE E LA PRATICA DEL CLISTERE P16

IMPOSTAZIONE PER LA DRE / DRS

Parti necessarie:



Installazione:

Seguire la procedura per la preparazione del simulatore all'addestramento DRF, ma:

- installare l'inserto DRS anziché l'inserto DRF
- non utilizzare le feci solide (di tipo I scala Bristol) nell'inserto DRS

SIMULATORE PER LA CURA INTESTINALE E LA PRATICA DEL CLISTERE P16

IMPOSTAZIONE PER IL CLISTERE

Parti necessarie:



Installazione:



1. Assicurarsi di inserire correttamente l'inserito per la simulazione del clistere nella parte glutei

2. Per un maggiore realismo nel training, versare 2 misurini di polvere solubile per feci artificiali nel serbatoio interno per clistere sul quale dovrà essere già installato il coperchio interno. Assicurarsi che i punti rossi del coperchio interno e del serbatoio siano allineati

3. Assicurarsi che il serbatoio sia installato correttamente nell'inserito glutei e che i punti rossi siano allineati.

4. Collegare il port del serbatoio interno al serbatoio supplementare esterno spingendo il tubo del serbatoio interno per clistere attraverso la valvola blu senza perdite.



Nota:

Grazie al serbatoio esterno, il simulatore per la cura intestinale e la pratica del clistere P16 è in grado di gestire **sino a 2 litri di liquido** senza perdite.

Suggerimento:

Se si desidera eseguire l'addestramento con più di 1 litro di liquido, non dimenticare di collegare il serbatoio sicuro primario al serbatoio esterno secondario collegando il tubo interno e aprendo la clip.

SIMULATORE PER LA CURA INTESTINALE E LA PRATICA DEL CLISTERE P16

> DATI TECNICI

Peso: 3,8 kg

Dimensioni del simulatore: 55 × 35 × 32 cm

Temperatura operativa: Da 0 °C a +30 °C

Temperatura di stoccaggio: Da -10 °C a +40 °C

> ELENCO DEGLI ORDINI

Ricambi e materiali di consumo	Codice n.
Polvere di feci artificiali solubili (60 g)	1022521
Polvere di feci artificiali solide (1 kg)	1022522
Set di inserti rettali digitali di ricambio (3 pezzi di ogni inserto rettale digitale)	1022523

> INFORMAZIONI DI CONTATTO



3B Scientific
A worldwide group of companies

Italia 3B Scientific S.r.l.

Via Progresso, 46

40064 Ozzano dell'Emilia (BO) • Italia

Tel.: +39 051 79 05 05 • Fax: +39 051 469 50 98

3bscientific.it • vendite.italia@3bscientific.com