



1019639 | P95

3bscientific.com

Taglio del perineo e simulazione di sutura

Introduzione

Avete acquistato un simulatore con il quale è possibile dimostrare e praticare il trattamento e la sutura corretti di lacerazioni da parto. Esso dispone di un inserto genitale morbido che, a seconda delle esigenze, può essere dotato di un taglio e quindi suturato più volte. Ciò consente di esercitarsi e, quindi, di migliorare gli standard (as es. le tecniche di sutura) nell'ambito di una gestione adeguata delle ferite durante i corsi di formazione per ostetrici e pediatri.

Fornitura


Inserto in silicone
Basamento
Supporto reclinabile



Funzioni

L'inserto in silicone del simulatore offre la possibilità di eseguire procedure di sutura individuali (ad es. episiotomia mediana, mediolaterale e laterale). L'ano è accessibile e consente la palpazione delle strutture muscolari nella zona del perineo (muscolo sfintere anale esterno, muscolo trasverso superficiale del perineo, muscolo bulbocavernoso).

È inoltre possibile simulare lacerazioni all'utero e alle labbra, nonché le tecniche terapeutiche ad esse associate. Le lacerazioni da parto possono essere trattate con le comuni tecniche di sutura, operando su ferite muscolari o cutanee e con la sicurezza di poter suturare lo stesso taglio più volte. A tal fine, è necessario rimuovere immediatamente il materiale di sutura (ad es. con forbici, bisturi o pinzette) prima di eseguire un'altra procedura.

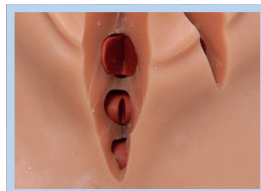

SIMULATORE DI SUTURA E TAGLIO DEL PERINEO



Montaggio

Montaggio del simulatore di sutura e taglio del perineo

- L'inserto in silicone può essere posizionato nel basamento di plastica bianco, al fine di garantire una tenuta sicura. Inoltre, un singolo rigonfiamento al centro del basamento simula la tipica deiscenza delle superfici lacerate. Per regolare il simulatore su un'inclinazione individuale, è possibile utilizzare il supporto reclinabile in dotazione. Porre il simulatore con i piedini su un supporto antiscivolo, ad es. su un tavolo.
- Se presente, rimuovere l'imballaggio di plastica dell'inserto in silicone e inserirlo nel basamento in plastica bianco
- Distendere le 3 braccia del supporto reclinabile
- La superficie triangolare creata dalle due braccia inferiori (vedere figura) rappresenta lo spazio dedicato al supporto del simulatore
- Richiudere la metà anteriore del braccio superiore fino a raggiungere l'inclinazione desiderata



Fig. 1: simulatore e basamento



Fig. 2: simulatore nel basamento



Fig. 3: simulatore nel basamento con supporto



Fig. 4: simulatore nel basamento
posizionato nel supporto inclinato

Pulizia e manutenzione

Le superfici del simulatore possono essere pulite con un panno umido. Prima di riporre il simulatore, assicurarsi che sia completamente asciutto.

Dati tecnici

Dimensioni:

Simulatore (AxLxP): 6 x 13 x 21 cm

Set nella custodia (AxLxP): 8 x 25 x 17 cm

Peso: ca. 0,8 kg

Condizioni d'esercizio:

Temperatura di esercizio: -10°C a +40°C

Temperatura di stoccaggio: -20°C a +60°C

Lista fornitura

XP95-001 / 1019640 Inserto di ricambio per simulatore di sutura e taglio del perineo

XP95-002 / 1019641 Set di inserti di ricambio per simulatore di sutura e taglio del perineo (5 pezzi)

Opzionale:

XP95-003 / 1020767 Kit di sutura per simulatore di sutura e taglio del perineo (materiale di sutura, supporto per l'ago, forbici, pinzetta, supporto per bisturi, lame)



Italia 3B Scientific S.r.l.

Via Progresso 46 • 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) • Italia

Telefono: +39-051-790505 • Fax: +39-051-4695098

3bscientific.it • vendite.italia@3bscientific.com

© Copyright 2016 for instruction manual and design of
product: 3B Scientific GmbH, Germany